

1. Tænd telefonen

Tryk på den nederste knap i højre side i 2-3 sekunder.

2. Saml Headset og Recorder




3. Før optagelsen


1) **Rens** dine ører grundigt med en vandbaseret vådserviet beregnet til rengøring af hud. Snavs forringer elektrodernes kontakt til huden og giver en dårligere optagelse.



2) **Rengør** de 3 elektroder i hver øreprop forsigtigt.

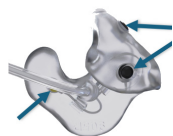


Hvis en elektrode er faldet ud, kan du forsigtigt trykke den tilbage i øreproppen.

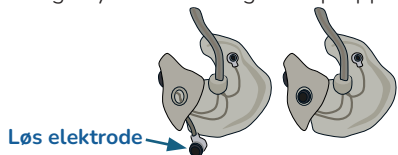

2

4. Start optagelse

Tænd Recorderen ved at trykke på knappen indtil lyset blinker grønt. Lyset skifter til konstant grønt og dæmpes efter et stykke tid. Telefonen viser "Optager":

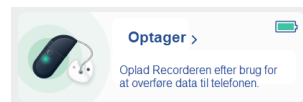


5. Isæt ørepropperne

Placér Recorderen bag dit højre øre. Put forsigtigt ørepropperne i ørerne.

Brug en finger til at checke at ørepropperne sidder godt, både i den øvre og nedre del af øret.


Brug evt. et spejl eller tag et billede af øret, så du bedre kan se om øreproppen sidder rigtigt som på billedet nedenfor.

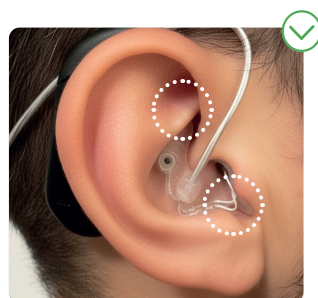

3

6. Vær opmærksom på:

Elektroderne har brug for god kontakt til huden for at måle hjerneaktiviteten (EEG). Check at ingen elektroder er synlige.

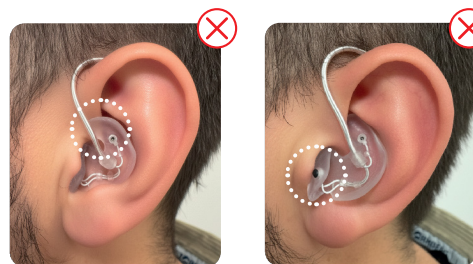

Forkert: den øverste del af øreproppen stikker ud.

Forkert: en elektrode er synlig.

7. Under brug:

Hvis dit øre bliver ømt når du ligger på øreproppen, prøv at mindske trykket på øreproppen ved at placere dit øre mellem to puder. Du kan også prøve at tage øreproppen ud og sætte den i igen, for at sikre at den sidder rigtigt.

Hvis du oplever problemer, så kontakt venligst din sundhedsfaglige hjælper.

8. EEG data

Dine optagelser overføres automatisk til Cebreo skyen, når Recorderen oplader og telefonen ligger i nærheden.

4

9. Opladning

Oplad Recorderen ved at forbinde den med den udleverede oplader og Adaptor.

Recorderens lys blinker hvidt og telefonen viser "Opladning".

For at oplade telefonen skal Adaptoren fjernes og ledningen sættes i telefonen.

Bemærk: Hold små genstande og oplader ledningen uden for børns rækkevidde.



10. Kalender

En grøn prik på kalenderen angiver startdatoen for den optagede data og bekræfter, at data er overført til skyen.

En gul prik betyder, at data er gemt på telefonen og vil blive overført til skyen.



Produceret af:

Cebro Medical,
Borupvang 2, 3450 Allerød, Danmark

Den fulde brugsanvisning kan findes på
hjemmesiden:



www.cebreomedical.com

Rapportér alle hændelser eller bivirkninger,
der måtte opstå under brug af NeuroBuds™
til producenten og den relevante myndighed i
det land, hvor NeuroBuds™ blev anvendt.

Cebro
M e d i c a l

6

11. Rengøring og vedligeholdelse

NeuroBuds™ kan rengøres forsigtigt med en
vådserviet. Check at elektroderne sidder kor-
rekt i ørepropperne efter rengøringen.

12. Opbevaring og håndtering

For at beskytte udstyret mod indtrængning af
støv og fnug skal NeuroBuds™ opbevares i
æskén, beskyttet mod varme og direkte sollys.
NeuroBuds™ kan anvendes ved temperaturer
mellem +5 og +40 °C (41-104 °F) og ved en
relativ luftfugtighed på mellem 15 og 90 %
(ikke kondenserende), og ved tryk mellem 700
og 1060 hPa.

13. Forventet levetid

Headsettet har en drifts-levetid på 3 måneder.
Recorderen har en drifts-levetid på 6 måneder.

14. Bortskaffelse

Smid ikke nogle dele af NeuroBuds™
ud. Returnér venligst alle delene,
i den originale emaballage, til din
sundhedsansvarlige der udliveredede
dem.



7

Version: LBL-00018-1

15. Recorderens signaler



Grønne langsomme blink: Recorderen
starter op. Konstant grønt lys: Recorderen
optager. Lyset dæmpes efter kort tid. Tele-
fonen viser "optager".



Hvide langsomme blink: Recorderen
oplader.

Konstant hvidt: Recorderen er fuldt opla-
det. Telefonen viser "oplader".



Blåt: Recorderen har mistet forbindelsen til
telefonen. Kontakt venligst din sundheds-
ansvarlige.



Orange: Recorderen er fyldt op eller
løbet tør for strøm. Oplad venligst
Recorderen. Hvis problemet fortsætter,
kontakt venligst Cebro Medical.

NeuroBuds™ opsamler elektriske signaler
(EEG) fra hjernen. Udstyret kan ikke diagnosticere
sygdom men udelukkende opsamle information
omkring hjernens aktivitet.

God fornøjelse :-)

Cebro
M e d i c a l

8

NeuroBuds™ Quick Guide



Cebro
M e d i c a l